



TriflexAIR

Reparatiehandleiding

Inleiding

Deze handleiding beschrijft hoe verschillende onderdelen van het TriflexAIR-systeem kunnen worden verwijderd en vervangen. Neem voordat u of anderen onderdelen van het TriflexAIR-systeem gaat verwijderen of vervangen onderstaande voorschriften in acht:

- Het verwijderen of vervangen van onderdelen is op eigen risico. Tribus kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor letsel of schade die voortvloeit uit de verwijdering of vervanging van onderdelen door anderen.
- Laat onderdelen alleen verwijderen of vervangen door een ervaren monteur.
- Neem bij onduidelijkheden of bij onderdelen die niet in deze handleiding behandeld worden altijd contact op met Tribus via info@tribus.nl of 030-669 50 20.

Inhoudsopgave

Inleiding	1
Inhoudsopgave	1
Vervangen van de voorste retractoren (spanbanden)	2
Vervangen van de achterste retractoren (spanbanden)	4
Vervangen van de driepuntsgordel	6
Vervangen van de heupgordel	8

Bestellen losse onderdelen

Bij elke reparatieinstructie in deze handleiding staat een onderdelenlijst. Deze onderdelen kunnen worden besteld in onze webshop - www.tribus.nl/shop - of via onderdelen@tribus.nl.



Positie van de onderdelen




1. Voorste retractoren
2. Achterste retractoren
3. Driepuntsgordel
4. Heupgordel

Vervangen van de voorste retractoren

- a. Ontgrendelmechaniek
- b. Retractor
- c. Band
- d. Triangel
- e. Haak
- f. Inbusbout M10x20
- g. Inbusbout M10x25
- h. Afstandsbus

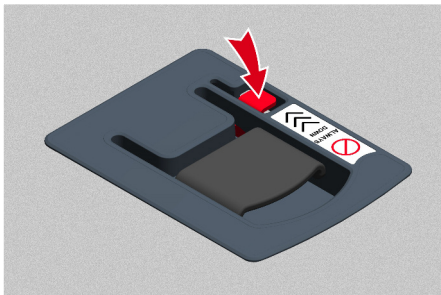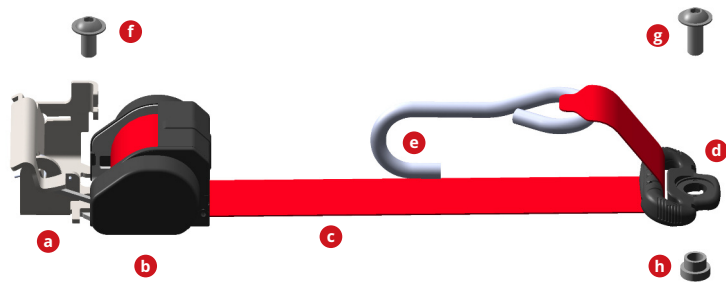


1. Zorg dat het rode pedaal van de centrale ontgrendeling omlaag staat.

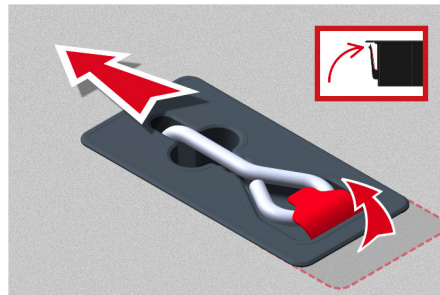


2. Neem de kunststof behuizing van de retractor uit de vloer door de behuizing richting de achterzijde van het voertuig te trekken (dit vereist wat kracht) en het achterste deel op te tillen.


Instructievideo: vimeo.com/135555742

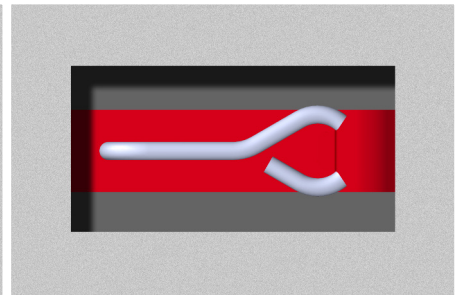

3. Er is nu een gat (pocket) zichtbaar. Hier kan straks de retractor uit de vloer gehaald worden.

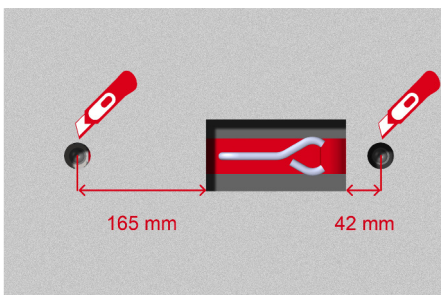


4. Snijd op de aangegeven plaatsen twee gaten in de vloerbedekking. U kunt op deze plaatsen de vloerbedekking indrukken. Door deze gaten zijn er nu twee inbusbouten bereikbaar.

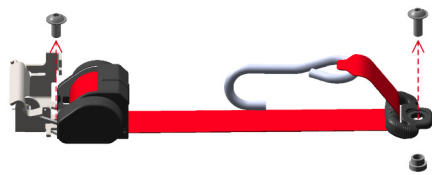


5. Draai de twee inbusbouten los en neem ze uit de vloer. Schuif hierna de gordel met het ontgrendelmechaniek naar de pocket toe en neem de gordel uit de vloer. Het ontgrendelmechaniek mag in de vloer blijven zitten.


Let erop dat de binnen-buitenkabel in het ontgrendelmechaniek blijft zitten!

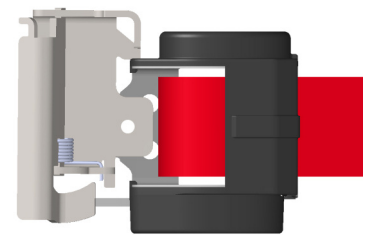


6. De nieuwe gordel kan nu in de vloer aangebracht worden. Lijn het gat van de retractor uit onder het gat van het ontgrendelmechaniek, zoals hierboven aangegeven.

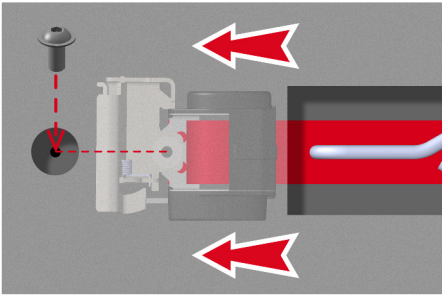


7. Schuif de retractor en ontgrendelmechaniek naar achter en bevestig deze weer in de vloer met de meegeleverde inbusbout M10x20.

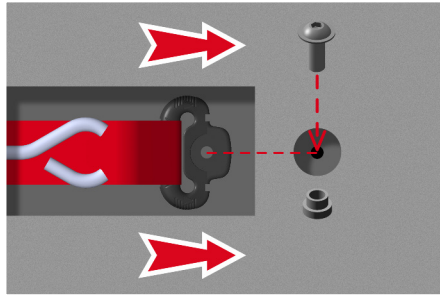

8. A – Trek vervolgens aan de trekhendel van de centrale ontgrendeling (zie stap 1), zodat het rode pedaal omhoog blijft staan. Schuif nu de triangel naar voren en zet deze vast met de andere meegeleverde inbusbout M10x25.

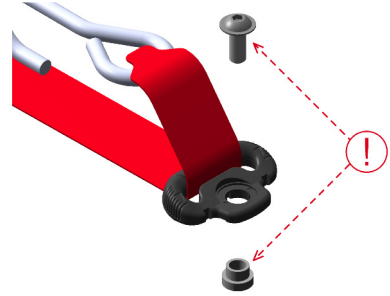

8. B – Let er op dat bij de triangel het busje niet vergeten wordt.

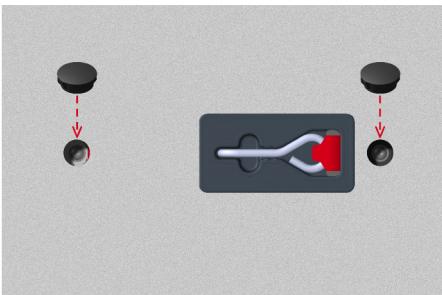

9. Plaats de behuizing terug in de vloer.

Controleer of het ver- en ontgrendelen door de centrale ontgrendeling goed werkt.

Plaats de meegeleverde kunststof doppen in de uitgesneden gaten.

Losse onderdelen retractor voorzijde

Bestellen: www.tribus.nl/shop | onderdelen@tribus.nl | 030 - 669 50 27

Retractor voorzijde
0000703005



Voetplaat
0000256011



Ontgrendelstrip
0000256012



Haak
0000701001



Inbusbout M10x20
0000152101



Inbusbout M10x25
0000152102



Torsieveer
0000256100





Afstandsbus
0000256350




Vervangen van de achterste retractoren

- a. Ontgrendelmechaniek
- b. Retractor
- c. Voetplaat
- d. Rol
- e. Haak
- f. Inbusbout M10x20
- g. Inbusbout M10x16

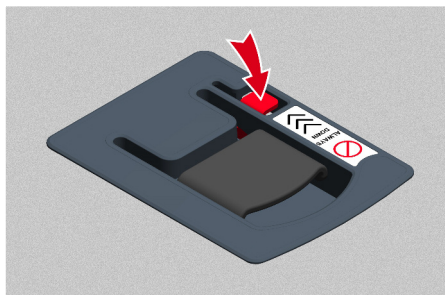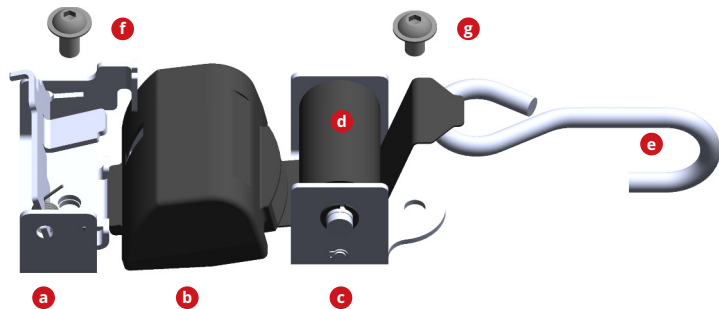


1. Zorg dat het rode pedaal van de centrale ontgrendeling omlaag staat.

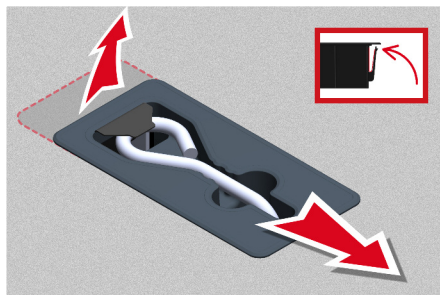


2. Neem de kunststof behuizing van de retractor uit de vloer door de behuizing richting de achterzijde van het voertuig te trekken (dit vereist wat kracht) en het achterste deel op te tillen.


Instructievideo: vimeo.com/135555742

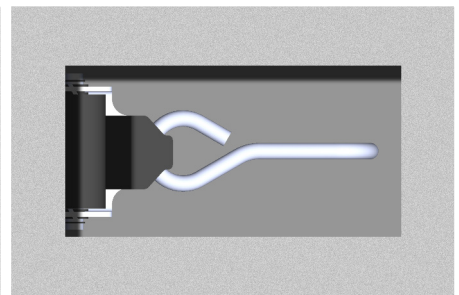

3. Er is nu een gat (pocket) zichtbaar. Hier kan straks de retractor uit de vloer gehaald worden.

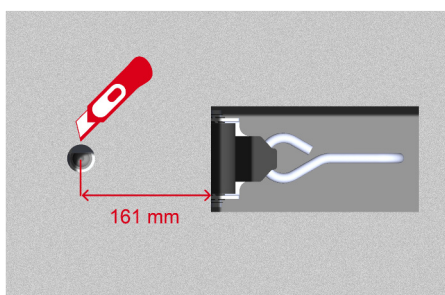


4. Snijd op de aangegeven plek een gat in de vloerbedekking. U kunt op deze plek de vloerbedekking indrukken. Door dit gat is nu een inbusbout bereikbaar.

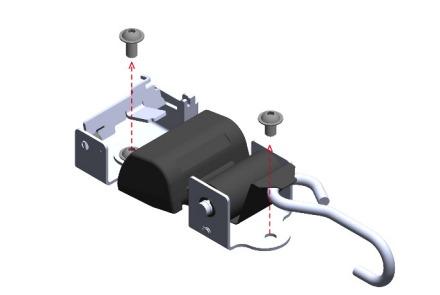


5. Draai de twee aangegeven inbusbouten los en neem ze uit de vloer. Schuif hierna de gordel met het ontgrendelmechaniek naar de pocket toe en neem de gordel uit de vloer. Het ontgrendelmechaniek mag in de vloer blijven zitten.


Let erop dat de binnen-buitenkabel in het ontgrendelmechaniek blijft zitten!

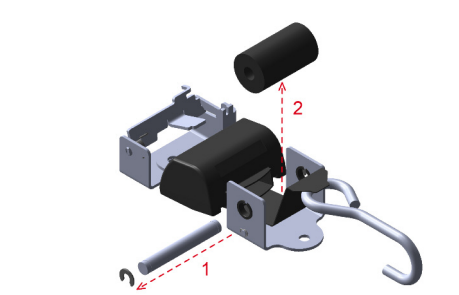

6. Haal de borgclip van de bovenste dickere as en neem schuif de as (1) uit de houder. De zwarte kunststof geleiderol kan nu ook weggenomen worden (2).

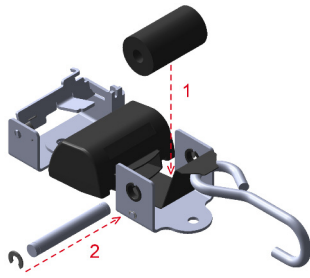


7. Plaats nu de nieuwe gordel en plaats de geleiderol (1) en de as (2) terug. Vergeet niet om de borgclip weer aan te brengen.

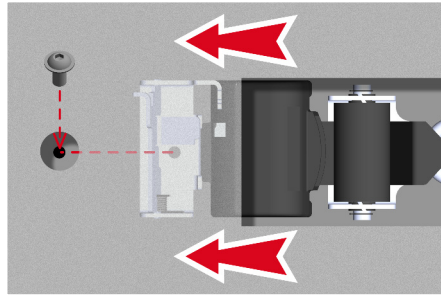


8. Leg de gordel en geleiderol weer terug in de vloer. Zorg ervoor dat het gat van de lip aan de retractor boven het gat van het ontgrendelmechaniek is uitgelijnd.

Schuif de retractor en het ontgrendelmechaniek naar achter en bevestig deze weer in de vloer met de meegeleverde inbusbout M10x20 (links).

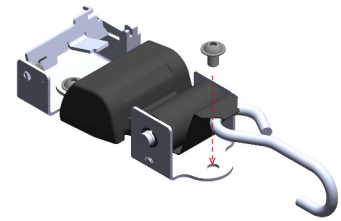

9. Zet hierna de houder weer vast met de meegeleverde inbusbout M10x16 (rechts).

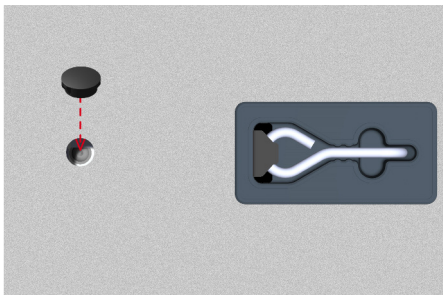

10. Plaats de behuizing terug in de vloer en controleer of het ver- en ontgrendelen door de centrale ontgrendeling goed werkt.

Plaats de meegeleverde kunststof dop in het uitgesneden gat.

Losse onderdelen retractor achterzijde

Bestellen: www.tribus.nl/shop | onderdelen@tribus.nl | 030 - 669 50 27

Retractor achterzijde
0000256152




Voetplaat retractor
0000256001



Voetplaat geleiderol
0000256004



As geleiderol
0000256052

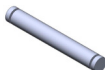

As voetplaat
0000256051

Ontgrendelstrip
0000256002



Geleiderol
0000256450



Torsieveer
0000256100



Inbusbout M10x20
0000152101



Inbusbout M10x16
0000152100





Asborgring 4 mm
0000256202

Asborgring 9 mm
0000256203



Vervangen van de driepuntsgordel


- a. Retractor achterzijde
- b. Retractor voorzijde
- c. Band
- d. Voetplaat met twee assen
- e. Gordeltongen
- f. Inbusbout M10x16 (4x)
- g. Asborgringen (4x)

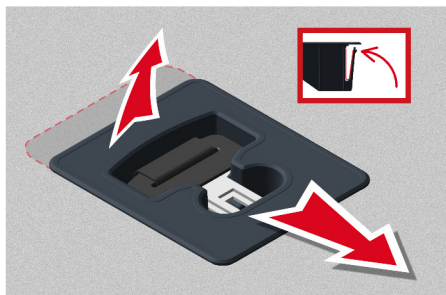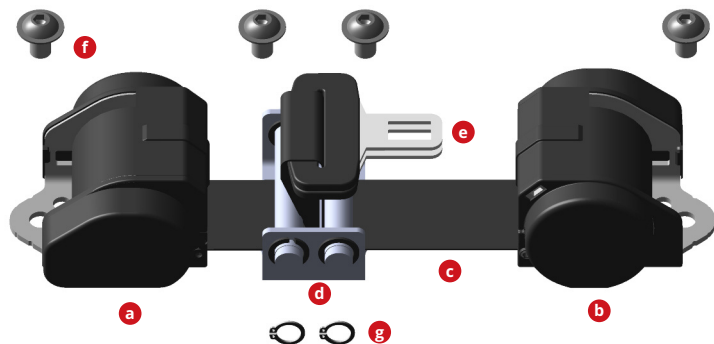


1. Neem de kunststof behuizing van de driepuntsgordel uit de vloer door de behuizing richting de achterzijde van het voertuig te trekken (dit vereist wat kracht) en het achterste deel op te tillen.

Instructievideo: vimeo.com/135555742


Duw de gordeltongen door de gleuf in de onderzijde.

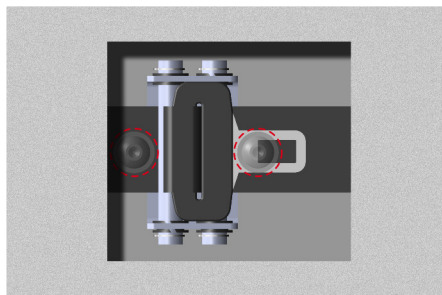


2. Trek de band opzij en verwijder de twee aangegeven inbusbouten van de voetplaat.

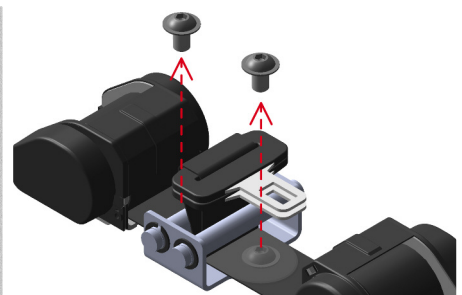


3. Extra toelichting bij 2.

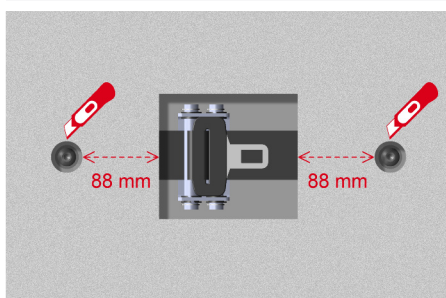



4. Snijd op de aangegeven plaatsen gaten in de vloerbedekking. U kunt op deze plaatsen de vloerbedekking indrukken. Via deze gaten is nu een inbusbout bereikbaar.

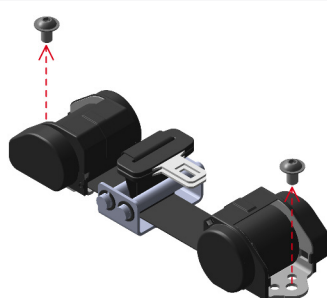

5. Draai de twee aangegeven inbusbouten los en neem ze uit de vloer. Schuif hierna de driepuntsgordel naar de pocket toe en neem de gordel uit de vloer.

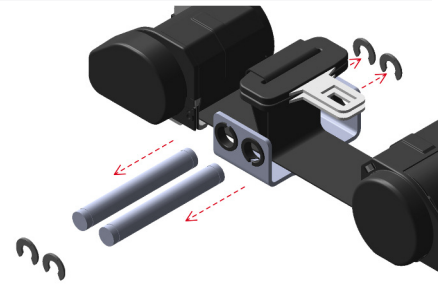

6. Verwijder de borgclip aan één zijde van beide assen en schuif de assen uit de voetplaat.

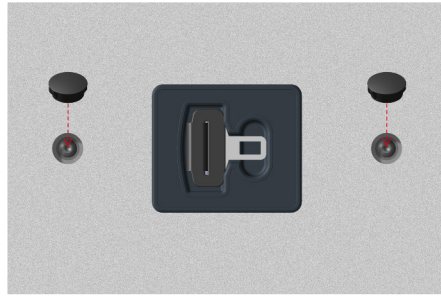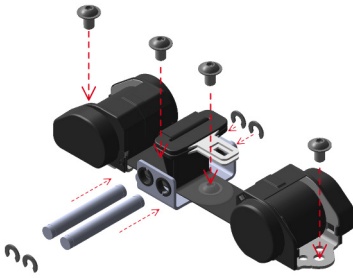

7. Leg de nieuwe gordel over de voetplaat. De assen kunnen weer terug in de voetplaat geschoven worden, zodat de gordel weer geleid wordt. Vergeet niet de asborgringen weer terug te plaatsen.

Zet de retractors en voetplaat weer vast met de 4 meegeleverde M10x16 inbusbouts.

8. Plaats de behuizing terug in de vloer en controleer of de driepuntsgordel naar behoren werkt.

Plaats de meegeleverde kunststof doppen in de uitgesneden gaten.

Losse onderdelen driepuntsgordel

Bestellen: www.tribus.nl/shop | onderdelen@tribus.nl | 030 - 669 50 27

Driepuntsgordel
0000703001



Voetplaat
0000256009


Asborgring 9 mm
0000256203



Plaatlager
0000256351



Geleideas
0000256052


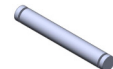


Inbusbout M10x16
0000152100



Vervangen van de heupgordel


- a. Retractor
- b. Band
- c. Triangel
- d. Gordelslot
- e. Inbusbout M10x25
- f. Inbusbout M10x16
- g. Afstandsbus

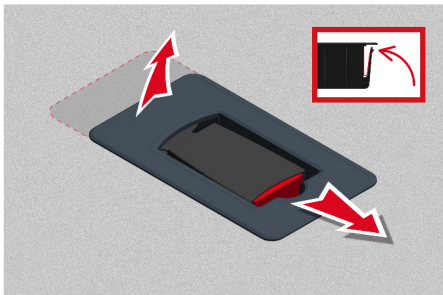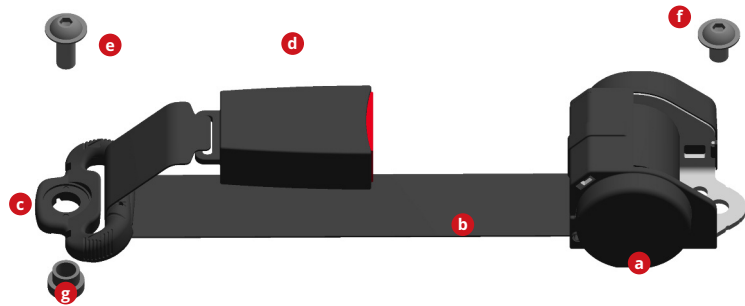

1. Neem de kunststof behuizing van de gordelvanger uit de vloer door de behuizing richting de achterzijde van het voertuig te trekken (dit vereist wat kracht) en het achterste deel op te tillen.


Instructievideo: vimeo.com/135555742

Duw het gordelslot door de gleuf in de onderzijde.

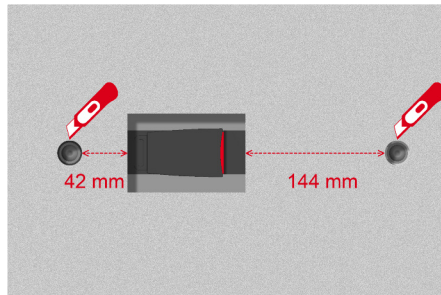


2. Snijd op de aangegeven plaatsen twee gaten in de vloerbedekking. U kunt op deze plaatsen de vloerbedekking indrukken.


Via deze gaten is nu een inbusbout bereikbaar.

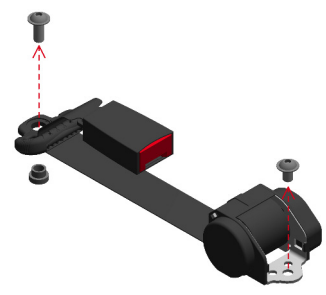


3. Draai de twee aangegeven inbusbouten los en neem ze uit de vloer. Schuif hierna de gordel naar de pocket toe en neem de gordel uit de vloer.

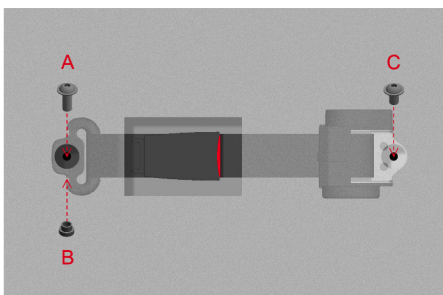

4. A - Plaats de nieuwe gordel. De triangel wordt vastgezet met de bout M10x25 (A) en de retractor met de bout M10x16 (C).

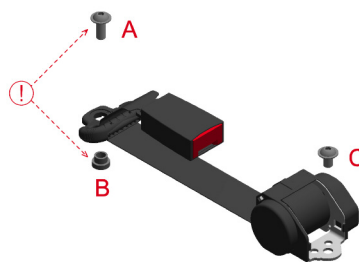

4. B - Vergeet bij de triangel niet het busje (B) te monteren.

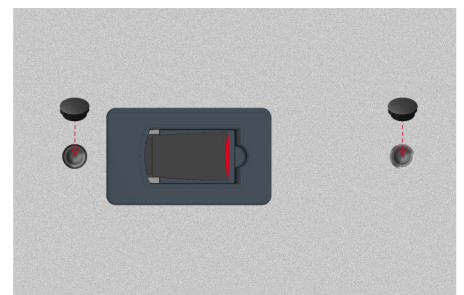

5. Plaats de behuizing terug door de gordelvanger door de gleuf aan de onderzijde te leiden en de behuizing in het gat te klikken.

Plaats de meegeleverde kunststof doppen in de uitgesneden gaten.

Losse onderdelen heupgordel

Bestellen: www.tribus.nl/shop | onderdelen@tribus.nl | 030 - 669 50 27

Heupgordel
0000703002



Inbusbout M10×25
0000152102



Inbusbout M10×16
0000152100



Afstandsbus
0000256350





Tribus B.V.
Proostwetering 71
3543 AC Utrecht
The Netherlands

T +31(0) 30 - 669 50 20
F +31 (0) 30 - 669 50 21
E info@tribus.nl
I www.tribus-group.com

